

Produkt	Nr kat.	Rozmiar	Sztuk w opakowaniu
3M Scotchcast™ Plus Usztywniająca opaska ortopedyczna Kolor: biały	82001	1,8 m x 2,5 cm	10 sztuk w kartonie
	82002	3,6 m x 5,0 cm	10 sztuk w kartonie
	82003	3,6 m x 7,6 cm	10 sztuk w kartonie
	82004	3,6 m x 10,1 cm	10 sztuk w kartonie
	82005	3,6 m x 12,7 cm	10 sztuk w kartonie
3M Scotchcast™ Plus Usztywniająca opaska ortopedyczna Kolor: niebieski	82002B	3,6 m x 5,0 cm	10 sztuk w kartonie
	82003B	3,6 m x 7,6 cm	10 sztuk w kartonie
	82004B	3,6 m x 10,1 cm	10 sztuk w kartonie
	82005B	3,6 m x 12,7 cm	10 sztuk w kartonie
3M Scotchcast™ Plus Usztywniająca opaska ortopedyczna Kolor: zielony	82002G	3,6 m x 5,0 cm	10 sztuk w kartonie
	82003G	3,6 m x 7,6 cm	10 sztuk w kartonie
	82004G	3,6 m x 10,1 cm	10 sztuk w kartonie
	82005G	3,6 m x 12,7 cm	10 sztuk w kartonie
3M Scotchcast™ Plus Usztywniająca opaska ortopedyczna Kolor: jasnoniebieski	82002L	3,6 m x 5,0 cm	10 sztuk w kartonie
	82003L	3,6 m x 7,6 cm	10 sztuk w kartonie
	82004L	3,6 m x 10,1 cm	10 sztuk w kartonie
	82005L	3,6 m x 12,7 cm	10 sztuk w kartonie
3M Scotchcast™ Plus Usztywniająca opaska ortopedyczna Kolor: czerwony	82002R	3,6 m x 5,0 cm	10 sztuk w kartonie
	82003R	3,6 m x 7,6 cm	10 sztuk w kartonie
	82004R	3,6 m x 10,1 cm	10 sztuk w kartonie
	82005R	3,6 m x 12,7 cm	10 sztuk w kartonie
3M Scotchcast™ Plus Usztywniająca opaska ortopedyczna Kolor: fioletowy	82002U	3,6 m x 5,0 cm	10 sztuk w kartonie
	82003U	3,6 m x 7,6 cm	10 sztuk w kartonie
	82004U	3,6 m x 10,1 cm	10 sztuk w kartonie
	82005U	3,6 m x 12,7 cm	10 sztuk w kartonie
3M Scotchcast™ Plus Usztywniająca opaska ortopedyczna Kolor: żółty	82002Y	3,6 m x 5,0 cm	10 sztuk w kartonie
	82003Y	3,6 m x 7,6 cm	10 sztuk w kartonie
	82004Y	3,6 m x 10,1 cm	10 sztuk w kartonie
	82005Y	3,6 m x 12,7 cm	10 sztuk w kartonie
3M Scotchcast™ Plus Usztywniająca opaska ortopedyczna Kolor: różowy	82002X	3,6 m x 5,0 cm	10 sztuk w kartonie
	82003X	3,6 m x 7,6 cm	10 sztuk w kartonie
	82004X	3,6 m x 10,1 cm	10 sztuk w kartonie
3M Scotchcast™ Plus Usztywniająca opaska ortopedyczna Kolor: odblaskowy	82002J	3,6 m x 5,0 cm	10 sztuk w kartonie
	82003J	3,6 m x 7,6 cm	10 sztuk w kartonie
	82004J	3,6 m x 10,1 cm	10 sztuk w kartonie
3M Scotchcast™ Plus Usztywniająca opaska ortopedyczna Kolor: czarny	82002A	3,6 m x 5,0 cm	10 sztuk w kartonie
	82003A	3,6 m x 7,6 cm	10 sztuk w kartonie
	82004A	3,6 m x 10,1 cm	10 sztuk w kartonie
3M Scotchcast™ Plus Usztywniająca opaska ortopedyczna Kolor: jasnopomarańczowy	82002W	3,6 m x 5,0 cm	10 sztuk w kartonie
	82003W	3,6 m x 7,6 cm	10 sztuk w kartonie
	82004W	3,6 m x 10,1 cm	10 sztuk w kartonie
3M Scotchcast™ Plus Usztywniająca opaska ortopedyczna Kolor: jasnozielony	82002V	3,6 m x 5,0 cm	10 sztuk w kartonie
	82003V	3,6 m x 7,6 cm	10 sztuk w kartonie
	82004V	3,6 m x 10,1 cm	10 sztuk w kartonie
3M Soft Cast™ Półsztywna opaska ortopedyczna Kolor: biały	82101	1,8 m x 2,5 cm	10 sztuk w kartonie
	82102	3,6 m x 5,0 cm	10 sztuk w kartonie
	82103	3,6 m x 7,6 cm	10 sztuk w kartonie
	82104	3,6 m x 10,1 cm	10 sztuk w kartonie
	82105	3,6 m x 12,7 cm	10 sztuk w kartonie
3M Soft Cast™ Półsztywna opaska ortopedyczna Kolor: ciemnoniebieski	82102B	3,6 m x 5,0 cm	10 sztuk w kartonie
	82103B	3,6 m x 7,6 cm	10 sztuk w kartonie
	82104B	3,6 m x 10,1 cm	10 sztuk w kartonie

3M™ Soft Cast™ / Scotchcast™
Opaski usztywniające

lekke gipsy

NOWOŚĆ!



Nowoczesne materiały
do usztywniania kończyn
zamiast tradycyjnego gipsu

Lekkie i nowoczesne
3M™ Soft Cast™ - opaska półsztywna.
3M™ Scotchcast™ - opaska sztywna.



Dystrybutor produktów immobilizacyjnych:

ARmedical™

ARMEDICAL S.C.
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Kasprzaka 74
tel. fax: +48 32 261 71 36
fax: +48 32 268 63 05
e-mail: biuro@armedical.pl
www.armedical.pl

3M

3M Poland Sp. z o.o.,
Al. Katowicka 117,
Kajetany, 05-830 Nadarzyn,
tel. 22 739 60 00,
fax. 22 739 60 01. www.3m.pl
3M, Soft Cast™, Scotchcast™ są znakami
handlowymi 3M
© 3M 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Tutaj kupisz:

3M

Nowoczesne unieruchomienia

3M™ Soft Cast™ / Scotchcast™

Technika nakładania Scotchcast Plus

1. Nałóż podkład na miejsce aplikacji

- przy Scotchcast Plus - dwie warstwy waty izolacyjnej (Cast Padding) i/lub pończochy (3M Stockinet).*

- przy Soft Cast jedną lub dwie warstwy pończochy

2. Nałóż rękawice ochronne.

3. Przygotuj pierwszą opaskę. Są dwa sposoby aplikacji.

- zanurz opaskę w wodzie o temperaturze pokojowej (im woda cieplejsza, tym czas aktywacji krótszy) na 3-5 sek., wtedy usztywnienie nastąpi po około 5-6 min. Czas można skrócić do około 3 min ściskając opaskę 2-3 razy w wodzie.

- nie mocz opaski - czas wydłuża się w ten sposób do kilkunastu minut (można go regulować poprzez zwilżanie).
Uwaga! „śliskość” suchej opaski obniża się.

4. Owijaj opaskę na „zakładkę” od 1/2 do 2/3 jej szerokości. Opaska jak i wata łatwo rozciąga się poprzecznie nie tworząc fałd. Zwracaj uwagę, by opaska nie była zbyt mocno napinana w kierunku podłużnym (przy owijaniu uwzględnij elastyczność opaski). Zbyt mocne napięcie w kierunku podłużnym może spowodować obrzęk.

5. Wykonaj do 3 warstw Scotchcast Plus / Soft Cast w przypadku unieruchomienia nie przenoszącego ciężaru, w innych do 4-6 warstw.


6. Zostaw 0,5-1 cm stokinety przy krawędziach opatrunku, by uniknąć uszkodzeń skóry.

7. Wymodeluj unieruchomienie na kończynie. Dobry rezultat daje owinięcie zwilżonym bandażem na około 2-3 min.

8. Po około 10 min od wykonania, opatrunek jest wystarczająco sztywny do unieruchomienia, po dalszych 20 min nabiera 100% właściwości usztywniających.

9. Poinformuj pacjenta, że w przypadku zamoczenia unieruchomienia, należy je wysuszyć, np. suszarką - zimnym powietrzem - dotyczy tylko opatrunku z Soft Cast™ lub opatrunku metodą Combicast™.

Jest to przykładowy sposób aplikacji, będący podstawą do opracowania przez lekarza indywidualnego sposobu aplikacji.

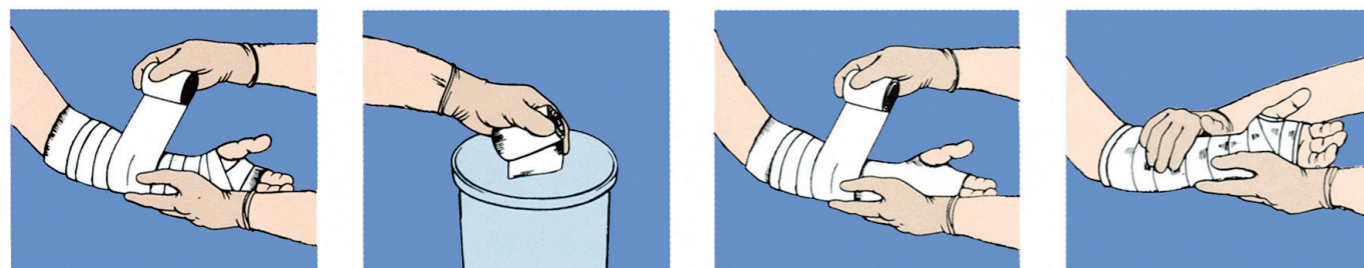

Przechowywanie

Uszkodzenie (przebite) opakowania powoduje stwardnienie rolki, czyniąc ją bezużyteczną. Przed otwarciem opakowania należy ją ścisnąć, rolka powinna być miękka.

Informacja, którą należy przekazać pacjentowi:

Po zamoczeniu, opatrunek należy wytrzeć do sucha ręcznikiem, a następnie suszyć suszarką do włosów zimnym powietrzem, kilka do kilkunastu minut, w zależności od powierzchni opatrunku. Niestaranne wysuszenie unieruchomienia może spowodować macerację skóry - dotyczy tylko opatrunku z Soft Cast™ lub opatrunku metodą Combicast™.

*Najlepszy efekt leczenia uzyskamy stosując Stockinet (podkład) i watę firmy 3M.

Ilość i szerokość opasek Scotchcast™ Plus w zależności od miejsca unieruchomienia

tutor udowy	opatrunek typu rękawica	opatrunek typu Sarmiento	gorset
10 cm 12,5 cm 1 m Stockinet 10 cm	5 cm 50 m Stockinet 5 cm	10 cm 75 m Stockinet 7,5 cm	12,5 cm 1,5 m Stockinet 20 cm
opatrunek ramienny	opatrunek przedramienny	opatrunek marszowy na goleń	opatrunek stopowo-udowy
7,5 cm 75 cm Stockinet 7,5 cm	7,5 cm 50 cm Stockinet 5 cm	10 cm 75 cm Stockinet 7,5 cm	10 cm 12 cm 1,25 m Stockinet 10 cm

Dostępne kolory 3M™ Soft Cast™



biały niebieski czerwony fioletowy

Dostępne kolory Scotchcast™



biały odblaskowy żółty czarny
pomarańczowy różowy czerwony fioletowy
jasnozielony zielony jasnoniebieski niebieski

Produkt	Nr kat.	Rozmiar	Sztuk w opakowaniu
3M Soft Cast™	82102R	3,6 m x 5,0 cm	10 sztuk w kartonie
Pólsztynna opaska ortopedyczna	82103R	3,6 m x 7,6 cm	10 sztuk w kartonie
Kolor: czerwony	82104R	3,6 m x 10,1 cm	10 sztuk w kartonie
3M Soft Cast™	82102U	3,6 m x 5,0 cm	10 sztuk w kartonie
Pólsztynna opaska ortopedyczna	82103U	3,6 m x 7,6 cm	10 sztuk w kartonie
Kolor: fioletowy	82104U	3,6 m x 10,1 cm	10 sztuk w kartonie
Synthetic Cast Padding	MW02	2,7 m x 5,0 cm	12 sztuk w kartonie
Syntetyczny podkład pod opatrunek	MW03	2,7 m x 7,6 cm	12 sztuk w kartonie
usztywniający	MW04	2,7 m x 10,1 cm	12 sztuk w kartonie
	MW06	2,7 m x 15,2 cm	12 sztuk w kartonie
3M Stockinet	MS01	22,8 m x 2,5 cm	1 sztuka
Syntetyczny podkład pod opatrunek	MS02	22,8 m x 5,0 cm	1 sztuka
usztywniający	MS03	22,8 m x 7,6 cm	1 sztuka
	MS04	22,8 m x 10,1 cm	1 sztuka
	MS06	22,8 m x 15,2 cm	1 sztuka
	MS08	22,8 m x 20,3 cm	1 sztuka
	MS10	22,8 m x 25,4 cm	1 sztuka